

CORPOFORM

For å unngå feilstillinger, lindre smerte, og øke komforten for brukere, er det viktig å ha en plan for posisjonering. Til hjelp i denne omsorgen er det viktig å ha riktige hjelpemidler.

Tekst/foto: CorpoForm

Innledning

Innenfor pleie og posisjonering er puter et mye brukt hjelpemiddel. Puter brukes av mange i forbindelse med posisjonering og stabilisering av brukere. Putenes formål er å forbedre ligge- og sittestillinger, og å lindre smerter, samt gi økt komfort. Puter brukes også til å stabilisere brukere i korrekte stillinger ved undersøkelser.

Vanlige puter har gjennom sin elastiske ettergivenhet og sitt innhold til formål å virke trykkdempende, gi økt komfort og å fylle ut tomrom. Ulempen med tradisjonelle puter er dog at de raskt forandrer seg, ved at de komprimeres og endrer form ved belastning. De må derfor til stadighet rettes på for å gi brukeren den ønskede hvile, støtte og avlastning.

Posisjonering

De faglige miljøene har i lang tid vært opptatt av at man bør ha en helhetsplan vedrørende posisjonering av brukere. Spesielt ved store funksjonshemninger

er det viktig å forebygge utvikling av feilstillinger og kontrakturer. Mange brukere inntar gjerne en «favorittstilling», mye på grunn av endringer i kroppens motorikk og biomekanikk, men også grunnet komfort. CorpoForm-putene gir mange muligheter for å oppnå en posisjon som er både komfortabel og forebyggende i forhold til feilstillinger og kontrakturer. Det er selvfølgelig viktig å ha en plan for hvilke posisjoner den aktuelle brukeren bør plasseres i og hvor ofte en bør variere disse. Her er det viktig med dialog mellom fysioterapeut, ergoterapeut, pleiere, foreldre og evt. andre som tar del i den daglige rutine. Som regel vil det være klar sammenheng mellom brukerens funksjonsnivå og behovet for posisjoneringsplan. Mange brukere har behov for posisjoneringshjelpemidler både liggende (på ryggen, på maven, på siden), sittende (manuell rullestol, elektrisk rullestol, løfte-hvilestol), og noen ganger også stående (ståstativ, ståbrett).

CorpoForm

CorpoForm-putene har eksistert i Norge siden 1990, og importør i Norge og medutvikler har hele tiden vært den samme. CorpoForm har et landsdekkende forhandlernet. I løpet av de siste, snart 20 årene, har CorpoForm utviklet et stort sortiment av puter med mange bruksområder.

Innholdet i putene består av et stort antall veldig små kuler av mer eller mindre ulik størrelse, som gjør at putene forblir i den ønskede posisjonen. Selve det innvendige trekket på putene er ugjennomtrengelig for vann, urin, blod osv. Sømmene er forsterket med en spesiell «rundkant» som gjør dem sterkere. Det innvendige trekket er lite elastisk, hvilket er en viktig egenskap for å kunne holde på ønskede posisjoner, dvs. at kulene blir hvor de er når riktig posisjon er funnet. For mye elastisitet ville fått kulene til å vandre. Det utvendige trekket er laget av et slitesterkt bomullsstoff,

som kan vaskes i maskin. Det er enkelt å skifte trekk, og mange brukere bestiller et ekstra sett for å lette vask og vedlikehold. De utvendige trekkene har forskjellige farger koblet til størrelse og modell på puten.

CorpoForm-putene har ikke de tradisjonelle putenes ettergivende egenskaper, de er derimot ytterst formbare og beholder fasongen. Fyllingsmaterialet tilpasser seg raskt den ønskede formen, slik at en god støtte oppnås. På samme måte som de former seg etter brukeren, former de seg også etter underlaget. Selv om putene holder på posisjonen, er det viktig å merke seg at de ikke oppleves som harde og fikserende. CorpoForm-putenes unike egenskaper er slik at de uten å være ettergivende, tilpasser seg brukeren. Putene «suger» seg fast til underlaget og blir liggende fast; dette er med på å bidra til at de holder på fasongen. Kombinasjonen av formbarhet og stabilisering gir unike egenskaper som vil lette hverdagen både for bruker og pleier/terapeut.

I daglig bruk

CorpoForm-putenes unike egenskaper vedrørende stabilitet og formbarhet, kombinert med et stort sortiment, gir gode muligheter for å tilpasse en god posisjonering. Putene kan brukes i de fleste situasjoner og gjerne i kombinasjon med andre hjelpemidler som anvendes til hvile o.a. CorpoForm-putene kan være alt fra en enkel hemiplegistøtte til hånden eller armen, til en hvileplass for sterkt funksjonshemmede. Det er lett å tilpasse en god stilling både sittende og liggende. I sittende og liggende stillinger

kan stillingen på en behagelig måte forandres. I helbredelsesprosesser kan smerter lindres.

Basisputer

Basisputer brukes for det meste til å sitte i, for hvile og avlastning, etter å ha sittet i for eksempel en skallstol. De kan også brukes til bl.a. å ligge på maven, og de gir behagelige hvilestillinger. Basisputene er store og finnes i tre størrelser. De gir brukeren en trygg, behagelig og avslappende sitteposisjon.

Carey transportvogn

Carey transportvogn brukes til hvile og posisjonering på lik linje som seng og hvilestol. I tillegg har den den fordel at den kan forflyttes både inne og ute. Har f. eks. en bruker sittet en periode i en skallstol, er det en utmerket løsning å komme over i Carey transportvogn og bli støttet opp med CorpoForm-puter.

I basseng

CorpoForm har en egen badeputeserie. Disse gir en avslappende og trygg effekt både for bruker og personell. CorpoForm badeputer har den egenskapen at de gir brukeren en stor vannfølelse, men likevel trygghet, og dermed en flott opplevelse av å være i vannet. Putene er stabile og tillater av den grunn brukeren å flyte i vannet uten at hjelpepersonell må holde fast for å stabilisere. Badeputene finnes i flere fasonger og størrelser for å kunne tilpasse seg brukeren og situasjonen på best mulig måte.

Generelt

Det store produktspekteret og de mange størrelsene på CorpoForm-putene, gjør det mulig å tilpasse de

fleste behov og ønsker. Farvekodene gjør det enkelt å forholde seg til størrelser i de forskjellige puteseriene. De løse, vaskbare utenpåliggende bomullstrekkene gjør putene veldig anvendelige, og badeputene gir selv de tyngste brukerne muligheten til å komme i basseng.

CorpoForm-putene kan også lages etter mål på spesialbestilling. Det store produktspekteret medfører dog at behovet for spesialprodukter ikke er så stort, men kun nødvendig i spesielle tilfeller. Noe av grunnen til vårt store produktspekter er nettopp det at det ikke skal være behov for spesial, dette forenkler hele bruken og forholdet til puter som et støtte- og posisjoneringsprodukt, som kan tilpasses der og da.

Totalt, inkludert badeputer og spesialputer til tannlegesektoren, består CorpoForm i dag av ca. 70 forskjellige puter.

Forhandlere

Vårt forhandlernetverk dekker i dag hele Norge. Vår målsetting er, i samarbeid med våre forhandlere, å være en god samarbeidspartner for våre kunder og brukere av våre produkt. Vi er selvfølgelig interessert i tilbakemeldinger på våre produkt. Positive tilbakemeldinger, for å få bekreftet hva vi har gjort riktig, og negative eller andre innspill for å kunne foreta utbedringer og eventuelt rette opp feil. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss:

www.balance.no

www.ovrebo.no

www.hepro.no

www.eurocontact.no



Til venstre: Basispute i kombinasjon med andre CorpoForm puter. Til høyre: Carey transportvogn med CorpoForm puter. Lengst til høyre: Bruker i avslappet situasjon i basseng med CorpoForm badeputer.

